

Návod k použití

Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate


Seznam a názvy produktů

Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate, 200 ml	Ref. 4752
Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO, 500 ml	Ref. 4801


Účel použití

Výrobek Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate je určen jako první pomoc pro výplach poranění a očí při nehodách s kyselinami a zásadami.

Návod k použití – piktogramy – Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate

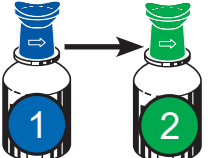


Vypláchněte oko nebo poranění roztokem Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate (modrá očnice) předtím, než použijete roztok Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride (zelená očnice).

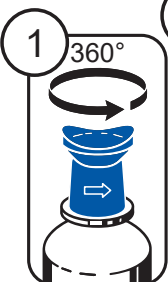


1 360°

Otočte uzávěrem.

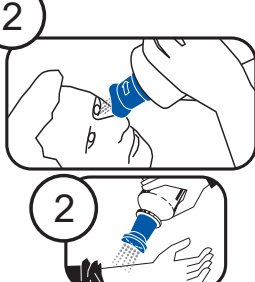


2

Roztokem Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate vypláchněte oko nebo poranění. Vyprázdněte láhev.

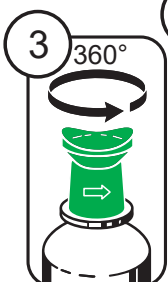


3 360°

Otočte uzávěrem.

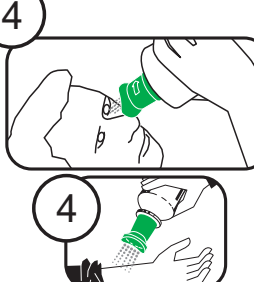


4

Pokračujte s vyplachováním pomocí roztoku Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride. Vyprázdněte láhev.

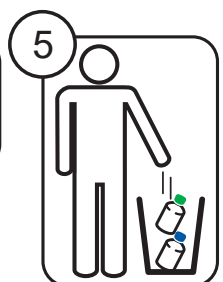

5


Prázdné lahve vyhoďte.

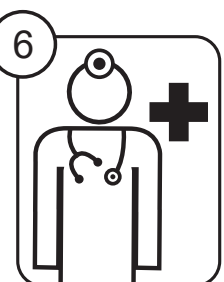

6

Vyhledejte lékařskou pomoc.

Návod k použití – piktogramy – Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO

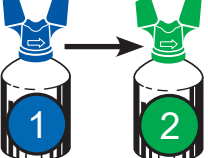


Vypláchněte oči nebo poranění roztokem Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO (modrá očnice) předtím, než použijete roztok Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO (zelená očnice).



1 360°

Otočte uzávěrem.

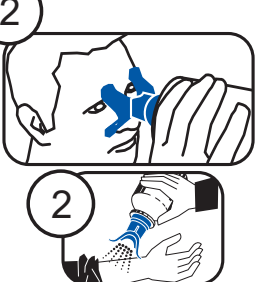


2

Vypláchněte oči nebo poranění roztokem Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO. Vyprázdněte láhev.




3 360°

Otočte uzávěrem.

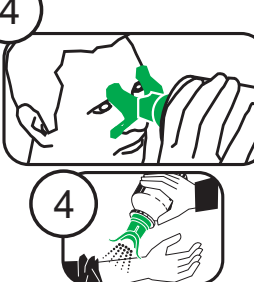


4

Pokračujte s vyplachováním pomocí roztoku Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO. Vyprázdněte láhev.

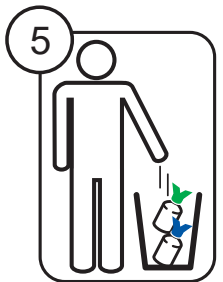

5

Prázdné lahve DUO vyhoďte.

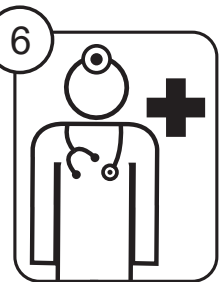

6

Vyhledejte lékařskou pomoc.

Varování



HF

Tento produkt nepoužívejte pro případy vystříknutí kapaliny obsahující kyselinu fluorovodíkovou.



Ca


Tento produkt nepoužívejte pro případy vystříknutí kapaliny obsahující vápník.



NaClO

Tento produkt nepoužívejte pro případy vystříknutí kapaliny obsahující chlornan sodný (bělicí látky).

Vysvětlení symbolů

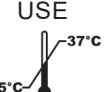	Další informace naleznete v brožurce na zadní straně etikety		Chcete-li si přečíst brožurku s dalšími informacemi, odlepte/otevřete vnější vrstvu etikety
	Označuje výrobce zdravotnického prostředku a zobrazuje se společně se jménem a adresou výrobce		Udává, jak otočit láhev
	Označení CE s číslem oznámeného subjektu		V případě poškození balení nepoužívejte
	Jednoduchý sterilní bariérový systém		Nepoužívejte opakovaně. Zdravotnický prostředek je určen pouze jednorázovému použití.
	Zdravotnický prostředek		Informuje o kódu šarže výrobce k identifikaci šarže/dávky
	Teplotní limit pro používání		Datum spotřeby. Označuje datum, po kterém se zdravotnický prostředek nesmí použít.
	Teplotní limit pro skladování		Datum výroby
 Ca	Предупреждение. Веществата, съдържащи калций, като например калциев хидроксид, цимент и вар, могат да повишат риска от нежелани ефекти при настъпване на увреждане на роговицата, което може да доведе до калцификация на роговицата.	 NaClO	Предупреждение. NaClO се среща в почистващи препарати (белини). Въпреки че дразнещото въздействие на алкалите ще бъде намалено чрез използването на буфер, дразнещото въздействие на хлора ще се повиши. Следователно не е препоръчително да използвате продукта в случаи на такива пръски.
 HF	Предупреждение. Флуороводородната киселина е токсична и силно разяждаща за очите, кожата и костите. Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate не е предназначено като първа помощ за инциденти с очите, включващи флуороводородна киселина, защото не ограничава разяждащото въздействие на HF.		

Nežádoucí účinky / nefunkčnost

Výrobky jsou určeny jako první pomoc pro výplach očí. Pokud se vyskytnou nežádoucí účinky nebo nefunkčnost, nahláste je prosím společnosti Plum Safety ApS na adresu info@plum.eu nebo na telefonní číslo +45 6916 9600, aby bylo možné provést nezbytná nápravná opatření. Závažné nežádoucí účinky je třeba vždy hlásit příslušnému odpovědnému orgánu.

Kontaktní údaje

Plum Safety ApS • Mandelalleen 1 • DK-5610 Assens • +45 6916 9600 • Email: Info@plum.eu • Web: plum.eu