

Instrucciones de uso

Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride

Lista de productos y denominaciones

Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride, 200 ml	Ref. 4691
Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride, 500 ml	Ref. 4604
Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride, 1000 ml	Ref. 4707
Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO, 500 ml	Ref. 4861
Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO, 1000 ml	Ref. 4800
Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride QuickRinse, 20 ml	Ref. 5160

Finalidad prevista

Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride es un producto de primeros auxilios estéril que enjuaga e irriga el polvo, la suciedad, los líquidos y los cuerpos extraños en heridas y ojos.

Instrucciones de uso - pictogramas - Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride



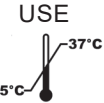
Instrucciones de uso - pictogramas - Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO



Instrucciones de uso - pictogramas - Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride QuickRinse



Aclaración de los símbolos

	Indica el fabricante del producto sanitario y se muestra junto con el nombre y la dirección del fabricante		Explica cómo se debe girar la botella
	Marca CE con el número del organismo notificado		No utilizar si el envase está dañado
	Sistema de barrera estéril único		No reutilizar. El producto sanitario está pensado para un solo uso.
	Producto sanitario		Informa del código de partida del fabricante que permite identificar la partida / el lote.
	Límite de temperatura para la utilización		Fecha de caducidad. Indica la fecha tras la cual no se debe utilizar el producto sanitario.
	Límite de temperatura para el almacenamiento		Fecha de producción
	Puede encontrar más información en el folleto ubicado tras la etiqueta		Despegue / abra la capa exterior de la etiqueta para leer el folleto con más información

Efectos secundarios / funcionamiento defectuoso

Los productos se han diseñado como productos de primeros auxilios para la irrigación ocular. En caso de experimentar efectos secundarios o un funcionamiento defectuoso, por favor, informe a Plum Safety ApS a través del correo electrónico info@plum.eu o el número de teléfono +45 6916 9600, con el fin de poner en marcha las medidas correctivas necesarias. Cualquier efecto adverso grave debe comunicarse a la autoridad competente pertinente en cada caso.

Contacto

Plum Safety ApS • Mandelalleen 1 • DK-5610 Assens •
+45 6916 9600 • Correo electrónico: Info@plum.eu • Página web: plum.eu