

Kasutusjuhend

Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate


Toodete loetelu ja nimed

Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate, 200 ml	Vilde 4752
Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO, 500 ml	Vilde 4801

Sihtotstarve

Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate on esmaabitoode haavade ja silmade irrigatsiooniks hapete ja leelistega seotud õnnetuste korral.


Kasutusjuhend – piktogrammid – Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate

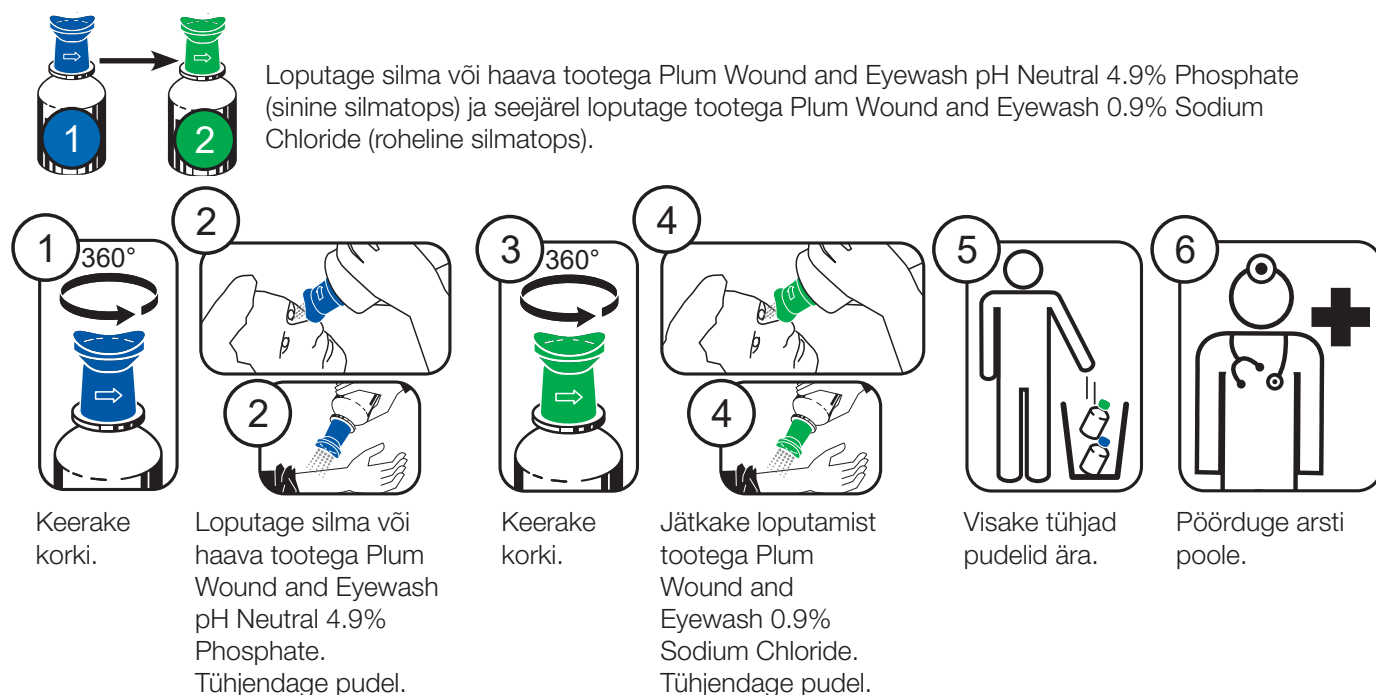

Loputage silma või haava tootega Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate (sinine silmatops) ja seejärel loputage tootega Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride (roheline silmatops).

- 1 360°
Keerake korki.
- 2
Loputage silma või haava tootega Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate. Tühjendage pudel.
- 3 360°
Keerake korki.
- 4
Jätkake loputamist tootega Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride. Tühjendage pudel.
- 5
Visake tühjad pudelid ära.
- 6
Pöörduge arsti poole.

Kasutusjuhend – piktogrammid – Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO

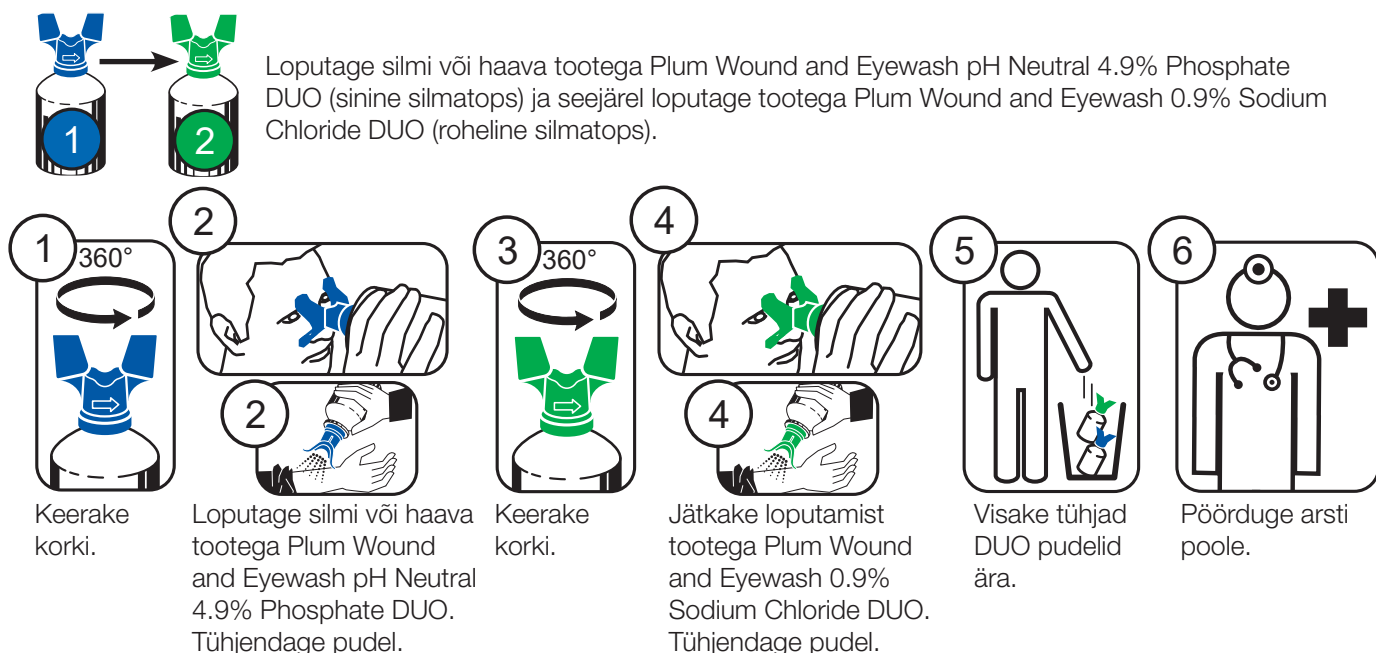

Loputage silmi või haava tootega Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO (sinine silmatops) ja seejärel loputage tootega Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO (roheline silmatops).

- 1 360°
Keerake korki.
- 2
Loputage silmi või haava tootega Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO. Tühjendage pudel.
- 3 360°
Keerake korki.
- 4
Jätkake loputamist tootega Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO. Tühjendage pudel.
- 5
Visake tühjad pudelid ära.
- 6
Pöörduge arsti poole.

Hoiatused



Ärge kasutage seda toodet vesinikfluoriidhapat sisaldavate pritsmetega seotud juhtudel.



Ärge kasutage seda toodet kaltsiumi sisaldavate pritsmetega seotud juhtudel.



Ärge kasutage seda toodet naatriumhüpokloriiti (pleegitusvahend) sisaldavate pritsmetega seotud juhtudel.

Sümbolite selgitus

	Lisateavet leiate sildi taga brošüüris		Lisateabega brošüüri lugemiseks eemaldage/avage sildi väliskiht
	Tähistab meditsiiniseadme tootjat ning on esitatud koos tootja nime ja aadressiga		Juhis, kuidas pudelit pöörata.
	CE-märgis koos teavitatud asutuse numbriga		Mitte kasutada, kui pakend on kahjustatud
	Ühe steriilse tõkke süsteem		Mitte kasutada korduvalt. Meditsiiniseade on ette nähtud ainult ühekordseks kasutamiseks
	Meditsiiniseade		Tootja partii kood partii tuvastamiseks
	Kasutustemperatuuri piirang		Kõlblikkusaeg. Näitab kuupäeva, pärast mida ei tohi meditsiiniseadet kasutada
	Säilitustemperatuuri piirang		Tootmiskuupäev
	Hoiatus! Kaltsiumi sisaldavad ained (nt kaltsiumhüdroksiid, tsement ja lubi) võivad sarvkesta kahjustuste korral suurendada kõrvaltoimete ohtu, mis võib tuua kaasa sarvkesta kaltsifitseerumise		Hoiatus! Naatriumhüpokloriit NaClO leidub puhastusvahendites (pleegitusvahendid). Kuigi puhvri kasutamine vähendab leelise ärritavat mõju, suureneb kloori ärritav mõju. Seetõttu ei ole toodet selliste pritsmete korral soovitatav kasutada
	Hoiatus! Vesinikfluoriidhape on mürgine ja väga söövitav silmadele, nahale ja luudele. Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate ei ole ette nähtud esmaabiks vesinikfluoriidhappega seotud õnnetusjuhtumite korral, sest see ei piira vesinikfluoriidhappe korrodeerivat mõju		

Kõrvaltoimed või tõrked

Tooted on ette nähtud kasutamiseks esmaabitootena silmade irrigatsiooniks. Kõrvaltoimete või tõrgete korral teatage neist Plum Safety ApS-ile (info@plum.eu või tel +45 6916 9600) vajalike parandusmeetmete algatamiseks. Tõsistest kõrvaltoimetest tuleb alati teatada asjaomasele pädevale asutusele.

Kontaktandmed

Plum Safety ApS • Mandelalleen 1 • DK-5610 Assens • +45 6916 9600 • E-post: Info@plum.eu • Veebisait: plum.eu