

Návod na použitie

Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride

Zoznam a názvy výrobkov

Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride, 200 ml	Ref. 4691
Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride, 500 ml	Ref. 4604
Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride, 1000 ml	Ref. 4707
Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO, 500 ml	Ref. 4861
Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO, 1000 ml	Ref. 4800
Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride QuickRinse, 20 ml	Ref. 5160

Určené použitie

Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride je sterilná pomôcka na prvú pomoc, ktorá sa používa na výplach a vyplavenie nečistôt, prachu, tekutín a cudzích telies z rán a očí.

Návod na použitie - piktogramy - Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride



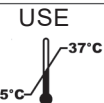
Návod na použitie - piktogramy - Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO



Návod na použitie - piktogramy - Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride QuickRinse



Vysvetlenie symbolov

	Označuje výrobcu zdravotníckej pomôcky a uvádza sa spolu s názvom a adresou výrobcu		Pokyny, ako je potrebné fľašu otočiť
	Označenie CE s číslom notifikovaného orgánu		Nepoužívajte, ak je obal poškodený.
	Systém jednej sterilnej bariéry		Nepoužívajte opakovane. Zdravotnícka pomôcka je určená len na jedno použitie.
	Zdravotnícka pomôcka		Informuje o kóde šarže výrobcu na identifikáciu šarže / dávky.
	Teplotný limit pre použitie		Dátum spotreby. Udáva dátum, po ktorom sa zdravotnícka pomôcka nesmie používať.
	Teplotný limit pre skladovanie		Dátum výroby
	Ďalšie informácie nájdete v príbalovom letáčku na zadnej strane etikety		Odlepte/otvorte vonkajšiu vrstvu etikety a prečítajte si letáčik s ďalšími informáciami

Vedľajšie účinky / nesprávne fungovanie

Výrobky sú navrhnuté ako pomôcky na prvú pomoc, ktoré sa používajú na vyplavenie očí. V prípade výskytu vedľajších účinkov alebo nesprávneho fungovania nahláste túto udalosť spoločnosti Plum Safety ApS, na adresu info@plum.eu alebo telefonicky na číslo +45 6916 9600, aby sme mohli prijať nápravné opatrenia. Vážne vedľajšie účinky sa musia vždy oznámiť príslušnému, kompetentnému úradu.

Kontakt

Plum Safety ApS • Mandelalleen 1 • DK-5610 Assens • +45 6916 9600 • Email: Info@plum.eu • Web: plum.eu